

Anlegeanleitung für Patienten

DONJOY® ULTRASLING™ PRO

LESEN SIE BITTE VOR DER VERWENDUNG DES HILFSMITTELS DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG DURCH. DIE KORREKTE ANWENDUNG IST ENTSCHEIDEND FÜR DIE EINWANDFREIE FUNKTION DES HILFSMITTELS.

1. Um die DONJOY® Ultrasling Pro abzunehmen, legen Sie Ihren Unterarm mit der Tasche, idealerweise in bequemer Position z.B. auf einem Tisch, einer Kommode oder einer Couchlehne, ab. So können Sie die Orthese ausziehen, ohne dass Ihr Unterarm unzuträgliche Bewegungen macht. Nehmen Sie den Unterarm- bzw. den Daumengurt ab.



2. Öffnen Sie nun den Schnellverschluss des Bauchgurtes an der Vorderseite des Kissens.



3. Öffnen Sie dann die Schnellverschlusschnallen des Schultergurtes an der vorderen Seite der Unterarmtasche.



4. Entfernen Sie nun langsam die Orthese.



5. Um die Orthese wieder anzulegen, legen Sie die Orthese geöffnet z.B. auf einem Tisch, einer Kommode oder einer Couchlehne ab. Platzieren Sie den Unterarm in der Unterarmtasche.



6. Kletten Sie nun den Daumengurt (zwischen Zeigefinger und Daumen verlaufend) und den Unterarmgurt wieder zu.



Anlegeanleitung für Patienten

DONJOY® ULTRASLING™ PRO

7. Führen Sie nun den Bauchgurt hinter dem Rücken entlang in Richtung Kissen und verschließen Sie den Schnellverschluss am Kissen.



8. Als Nächstes führen Sie langsam den gesunden Arm durch den Ring des Schultergurtes. Greifen Sie hierfür an die Stelle, an der der Schulterring am Gurt ansetzt (siehe Pfeil), so dass Sie nur noch, quasi wie beim Rucksack anziehen, reinschlüpfen müssen. Beachten Sie vorher, dass der Gurt nicht verdreht ist.



9. Verschließen Sie dann die beiden Schnellverschlusschnallen an der Vorderseite der Unterarmtasche.



10. Prüfen Sie, ob das Kissen in einer angemessenen Position dem Körper anliegt und dass der Ellenbogen in 90° gelagert wird.



ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

Von Hand mit milder Seife in warmem Wasser (86°F/30°C) reinigen. An der Luft trocknen lassen.

HINWEIS: Wenn die Orthese nicht gründlich abgespült wird, können Seifenreste Hautreizungen verursachen oder das Material angreifen.

NICHT bügeln.

NICHT im Trockner trocknen.

KEIN Bleichmittel verwenden.



Scannen und Anlegeanleitung
als Video anschauen